

# Uttak av spenepøver



TINE Mastittlaboratoriet Molde  
Postboks 2038  
6402 Molde  
Telefon: 918 66 600  
E-post: mastittlab.molde@tine.no

## Prøvene tas slik:

- Glass 1: Høyre framspene
- Glass 2: Venstre framspene
- Glass 3: Høyre bakspene
- Glass 4: Venstre bakspene

## OBS:


- Ta prøve fra spene med synlig mastitt til slutt for å hindre "smitte" fra glass til glass.
- Sørg for at jur og spener er tørre under prøvetakingen!



- Grundig håndvask!
- Rene og TØRRE hender



- Rene og TØRRE spener!

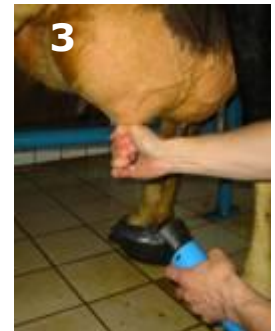

- Melk ut 10-15 ml i prøve kopp



- Gni spenespiss med 70% sprit e.l.



- Hold glasset på skrå og pass på at strålen går rett i glasset uten søl. Melkesøl tørkes straks!
- Fyll glasset maks  $\frac{3}{4}$  fullt
- Nedre del av korken og kanten av glasset MÅ IKKE komme i kontakt med fingre, gulv, ku e.l.



- Legg prøven kjølig så fort som mulig. Den kan med fordel fryses før sending
- Prøver tatt fredag, lørdag eller søndag fryses før sending mandag.
- **Husk frimerke på esken 😊**

## GODT JUR!

### Ta alltid spenepøver:

- Før avsinning av alle kyr med geometrisk middel over 100.000
- Av sinbehandla kyr 6 dager etter kalving
- Av alle synlige mastitter
- Av alle mastitter som behandles
- Ved kjøp og salg

Resultater av analyse av spenepøver finner du på helseoversikten på <http://medlem.tine.no>

Helseoversikten – verdens beste mastittstyringsverktøy!

20.03.2013