

# Uttak av speneprøver



TINE Mastittlaboratoriet Molde  
Postboks 2038  
6402 Molde  
Telefon: 918 66 600  
E-post: mastittlab.molde@tine.no

## Prøvene tas slik:

- Glass 1: Høyre framspene
- Glass 2: Venstre framspene
- Glass 3: Høyre bakspene
- Glass 4: Venstre bakspene

## OBS:

- Ta prøve fra spene med synlig mastitt til slutt for å hindre "smitte" fra glass til glass.
- Sørg for at jur og spener er tørre under prøvetakingen!



- Grundig håndvask!
- Rene og TØRRE hender



- Rene og TØRRE spener!



- Melk ut 10-15 ml i prøve kopp



- Gni spenespiss med 70% sprit e.l.



- Hold glasset på skrå og pass på at strålen går rett i glasset uten søl. Melkesøl tørkes straks!
- Fyll glasset **maks**  $\frac{3}{4}$  fullt
- Nedre del av korken og kanten av glasset MÅ IKKE komme i kontakt med fingre, gulv, ku e.l.

- Legg prøven kjølig så fort som mulig.
- Prøven kan fryses
- Prøven kan sendes med tankbilen

## GODT JUR!

### Ta alltid speneprøver:

- Før avsining av celletalls kyr (over 100.000 celler/ml)
- Ved synlige symptomer
- Ved all antibiotikabehandling

**Analyseresultater rapporteres til Eana 360**