

Uttak av spenepøver



TINE Mastittlaboratoriet Molde
Postboks 2038
6402 Molde
Telefon: 918 66 600
E-post: mastittlab.molde@tine.no

Prøvene tas slik:

- Glass 1: Høyre framspene
- Glass 2: Venstre framspene
- Glass 3: Høyre bakspene
- Glass 4: Venstre bakspene

OBS:


- Ta prøve fra spene med synlig mastitt til slutt for å hindre "smitte" fra glass til glass.
- Sørg for at jur og spener er tørre under prøvetakingen!



- Grundig håndvask!
- Rene og TØRRE hender



- Rene og TØRRE spener!

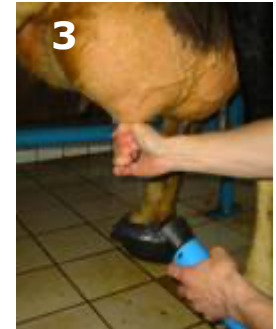

- Melk ut 10-15 ml i prøve kopp



- Gni spenespiss med 70% sprit e.l.



- Hold glasset på skrå og pass på at strålen går rett i glasset uten søl. Melkesøl tørkes straks!
- Fyll glasset maks $\frac{3}{4}$ fullt
- Nedre del av korken og kanten av glasset MÅ IKKE komme i kontakt med fingre, gulv, ku e.l.



- Legg prøven kjølig så fort som mulig. Den kan med fordel fryses før sending
- Prøven kan sendes med tankbilen

GODT JUR!

Ta alltid spenepøver:

Før avsining av celletallsstyr (over 100.000 celler/ml)

Ved synlige symptomer

Ved all antibiotikabehandling

Analyseresultater rapporters til <http://medlem.tine.no>